



Avec quel matériel ?


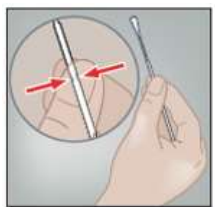



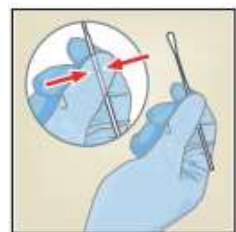


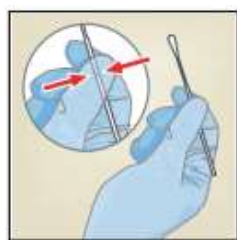

Réf. SWAB/G-50

Le kit de prélèvement d'échantillon vaginal / endocervical Xpert CT/NG contient



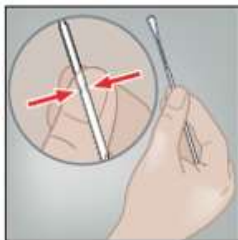




A → kit de prélèvement individuel

B → écouvillon de nettoyage (uniquement pour les PV réalisé par un préleveur)



Prélèvement vaginal		Gorge	Anus
Auto-prélèvement	Préleveur	Préleveur	Préleveur
<p>Ouvrir l'emballage (A) qui contient le tube de réactif de transport d'écouvillon Xpert fermé par un bouchon rose et l'écouvillon de prélèvement emballé individuellement. Mettez le tube de côté avant de prélever l'échantillon.</p>  <p>Tenez l'écouvillon dans la main en plaçant le pouce et l'index au milieu de la tige de l'écouvillon</p> 	<p>Eliminez l'excès de mucus de l'endocol et de la région environnante en utilisant l'écouvillon de plus grande taille (B). Jeter l'écouvillon.</p>  <p>Ouvrir l'emballage (A) qui contient le tube de réactif de transport d'écouvillon Xpert fermé par un bouchon rose et l'écouvillon de prélèvement emballé individuellement. Mettez le tube de côté avant de prélever l'échantillon.</p> 	<p>Ouvrez l'emballage (A) qui contient le tube de réactif de transport d'écouvillon Xpert fermé par un bouchon rose et l'écouvillon de prélèvement emballé individuellement. Mettez le tube de côté avant de prélever l'échantillon.</p>  <p>Tenez l'écouvillon dans la main en plaçant le pouce et l'index au milieu de la tige de l'écouvillon</p>  <p>Demandez au patient d'ouvrir la bouche au maximum et de tirer la langue. Réaliser le prélèvement sur le pharynx en effectuant des rotations avec l'écouvillon</p> 	<p>Ouvrez l'emballage (A) qui contient le tube de réactif de transport d'écouvillon Xpert fermé par un bouchon rose et l'écouvillon de prélèvement emballé individuellement. Mettez le tube de côté avant de prélever l'échantillon.</p>  <p>Tenez l'écouvillon dans la main en plaçant le pouce et l'index au milieu de la tige de l'écouvillon</p>  <p>Introduire prudemment l'écouvillon jusqu'à 1 cm après le sphincter et effectuer des rotations.</p> 



Prélèvement vaginal		Gorge	Anus
Auto-prélèvement	Préleveur	Préleveur	Préleveur
<p>Introduire avec précaution l'écouvillon dans votre vagin d'environ 5 cm à l'intérieur de l'ouverture du vagin</p>  <p>Tournez doucement l'écouvillon durant 10 à 30s. Assurez-vous que l'écouvillon touche la paroi du vagin de manière à ce que l'écouvillon absorbe les sécrétions. Sortez l'écouvillon.</p> 	<p>Tenez l'écouvillon dans la main en plaçant le pouce et l'index au milieu de la tige de l'écouvillon</p>  <p>Insérer l'écouvillon de prélèvement dans le canal endocervical. Tournez l'écouvillon dans le sens horaire durant 10 à 30s. Sortez délicatement l'écouvillon</p> 		
 <p>Dévissez le bouchon du tube de transport. Déposez immédiatement l'écouvillon de prélèvement d'échantillon dans le tube de réactif de transport</p>	 <p>Après avoir identifié la ligne de cassure, cassez la tige de l'écouvillon contre la paroi du tube. Jetez la partie supérieure de la tige.</p>	 <p>Rebouchez le tube de réactif de transport et serrez bien le bouchon. Etiquetez le tube avec les informations d'identification (NOM, Prénom, DDN, date du prélèvement)</p>	<p>Conservez le prélèvement à température ambiante et le déposer au laboratoire <u>dans les 24h.</u></p>